

PS3-Secustar


Update auf V9.10.0201

Prüfsequenzen werden nicht zum Secustar übertragen.

02.12.2008


Wenn in PS3 schon Prüfsequenzen vom Secustar vorhanden sind, so werden diese nach dem Update von PS3 nicht mehr zum Secustar übertragen, da diesen Sequenzen die Gruppenzuordnung fehlt. Diese muß ergänzt werden:

Klicken Sie auf Kataloge - Arbeitsvorschriften

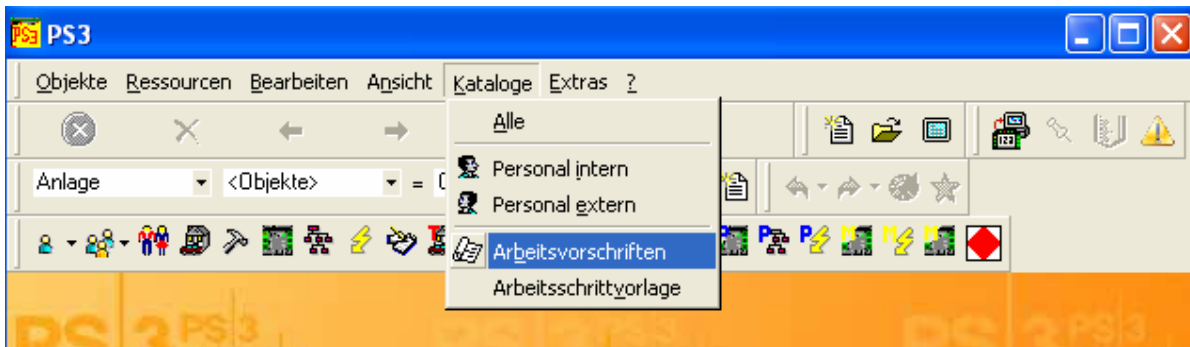


Klicken Sie anschließend auf Auswahl.

Klicken Sie bei Liste hinten auf Bearbeiten:

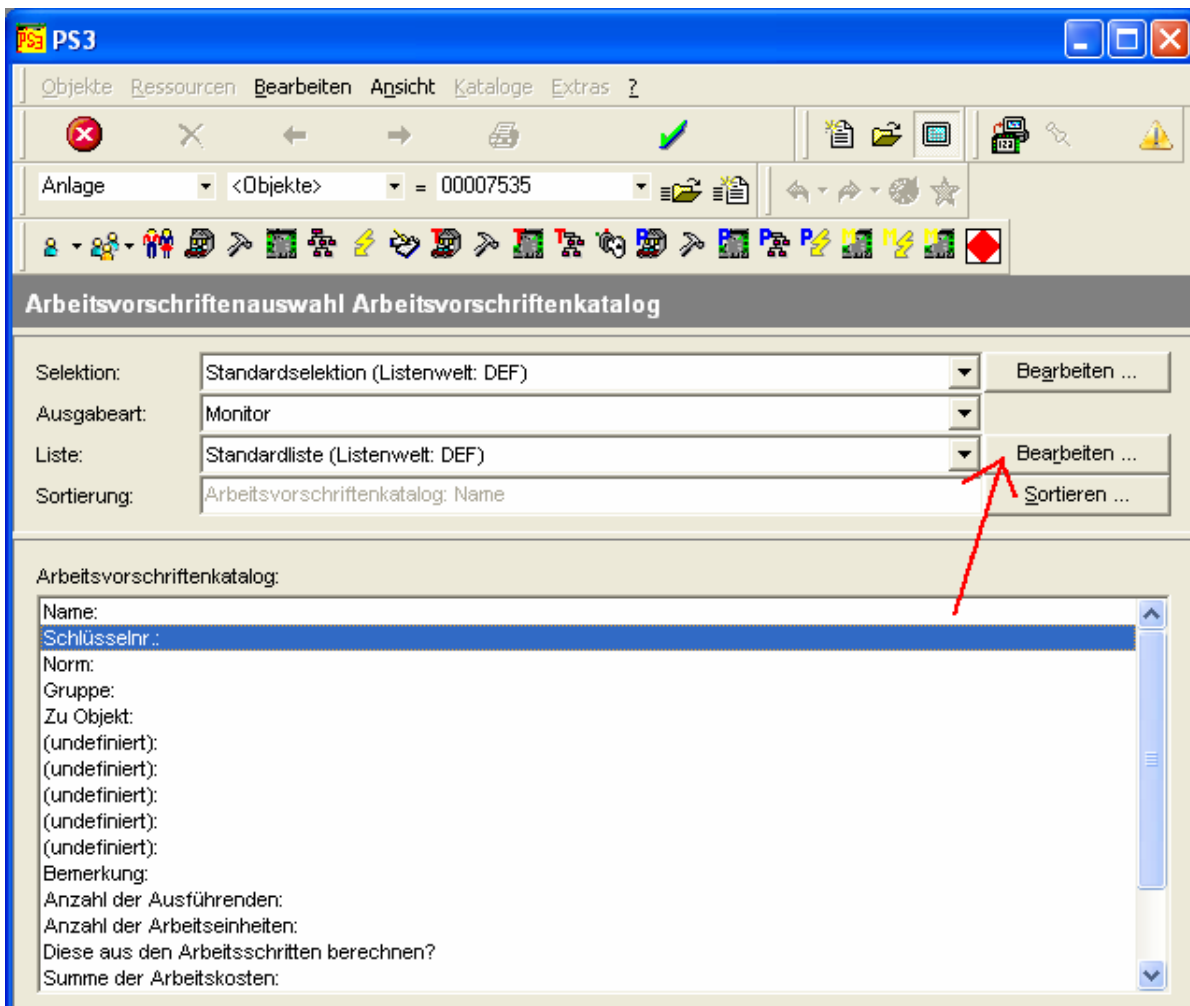


Klicken Sie auf Liste ändern. Klicken Sie in der mittleren Spalte auf Gruppe und auf Übernehmen. Dann erscheint das Feld Gruppe in der linken Spalte.

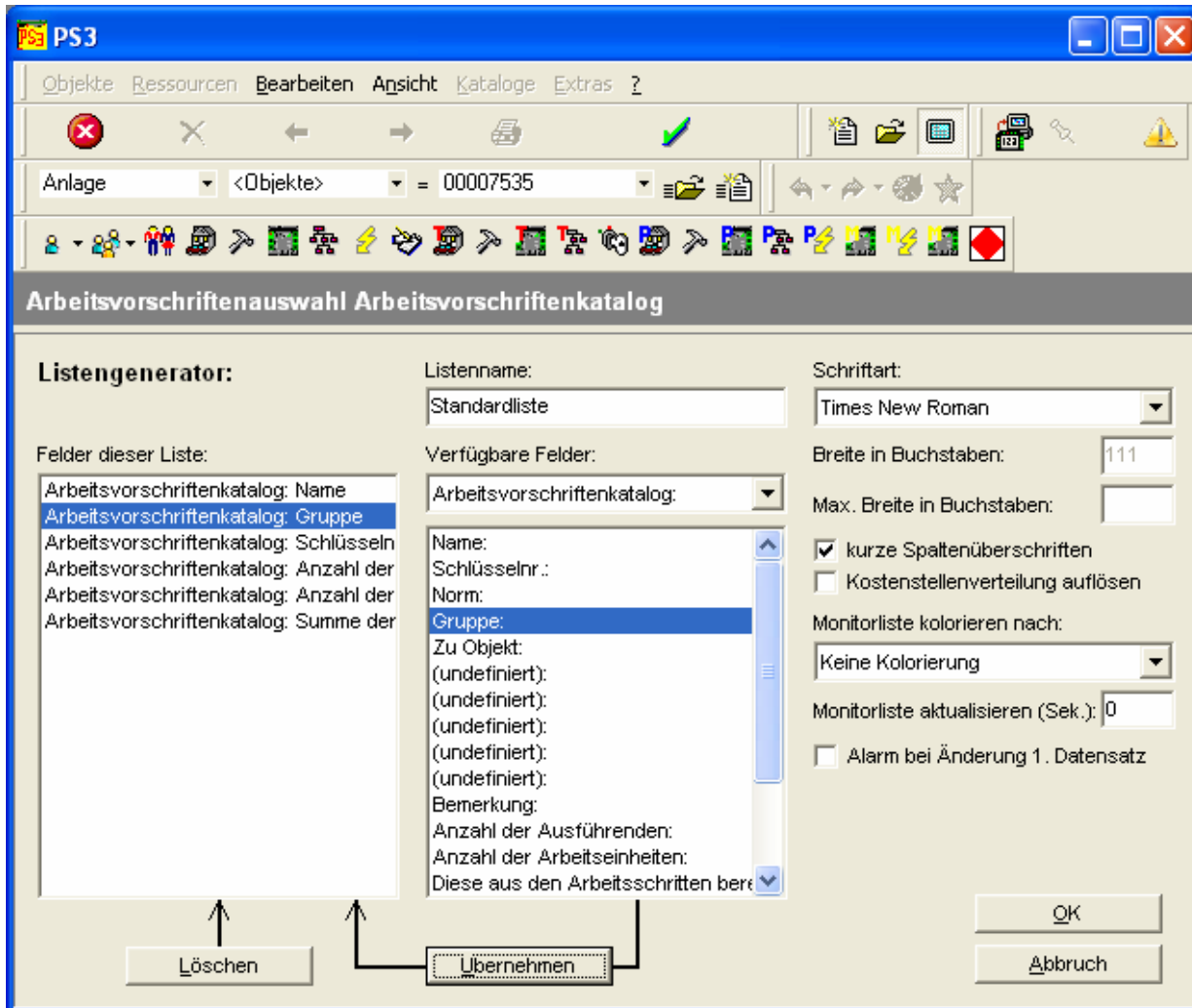


Bestätigen Sie dreimal mit dem grünen Halen.

Es erscheinen nun alle Prüfsequenzen (Arbeitsvorschriften), aber die Gruppe ist evt. teilweise leer.

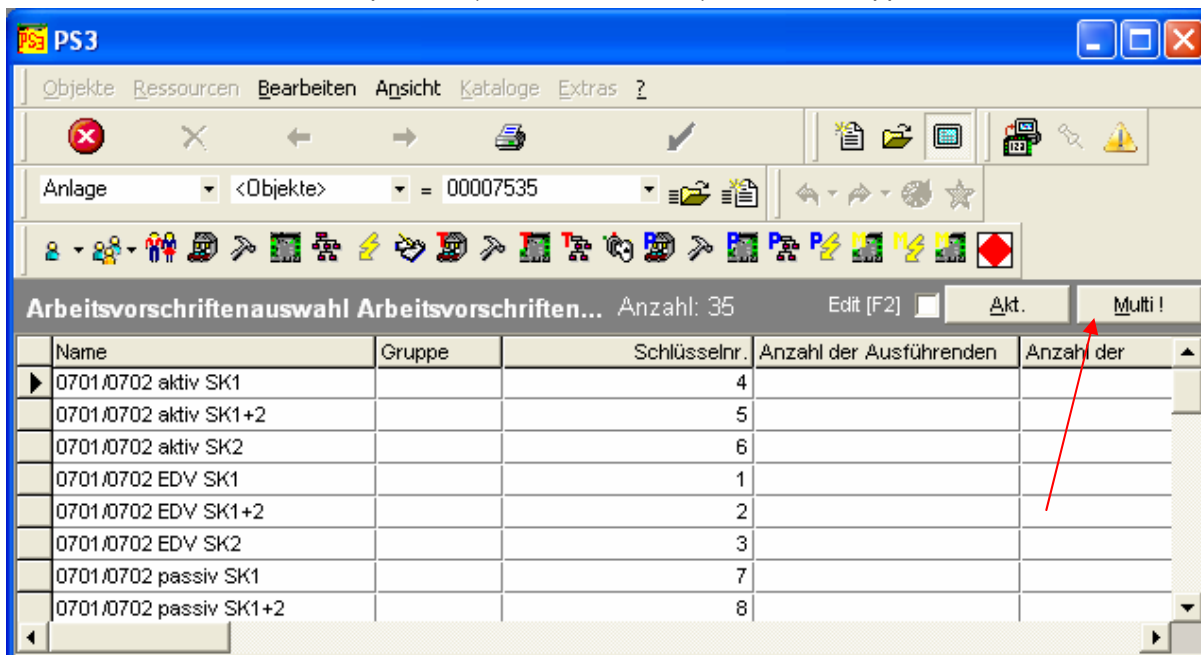

Klicken Sie nun auf das Feld Multi

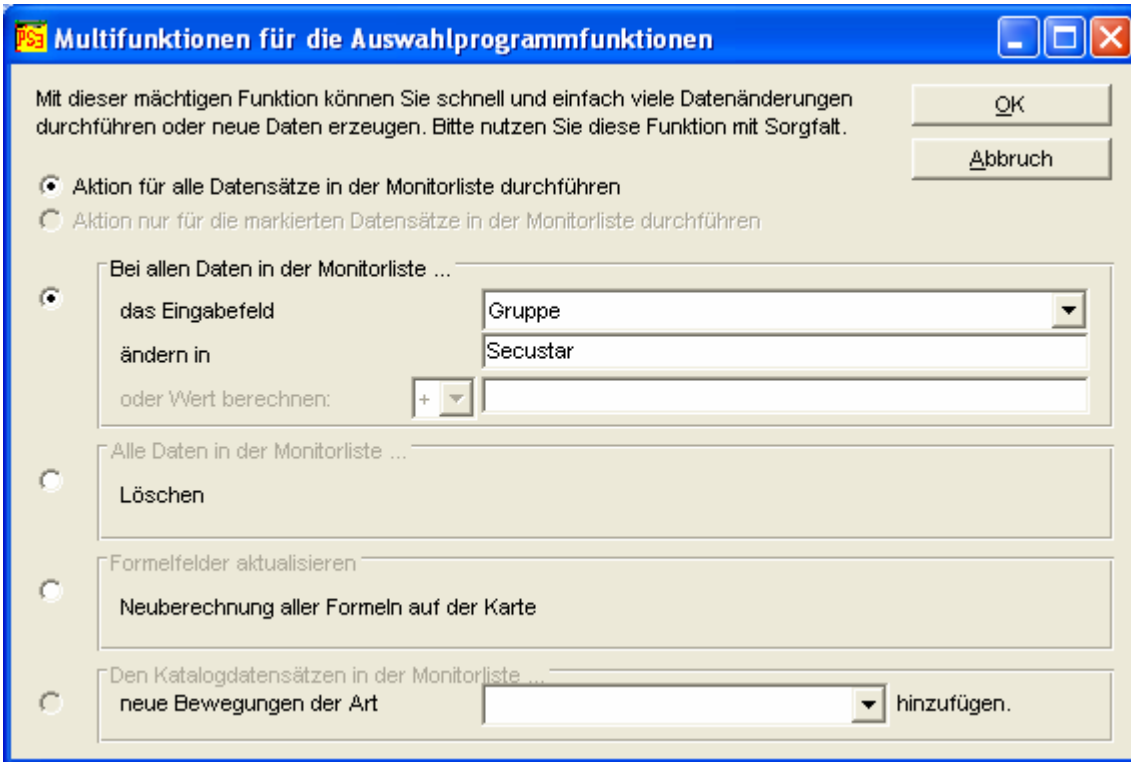


Wählen Sie die Option „Bei allen Daten in der Monitorliste das Eingabefeld“

Wählen Sie rechts das Feld Gruppe

tragen Sie in dem Feld „ändern in“ ein: Secustar

Bestätigen Sie mit OK und auch alle weiteren Meldungen.

Danach ist die Gruppe eingetragen und Sie können die Datensätze exportieren.

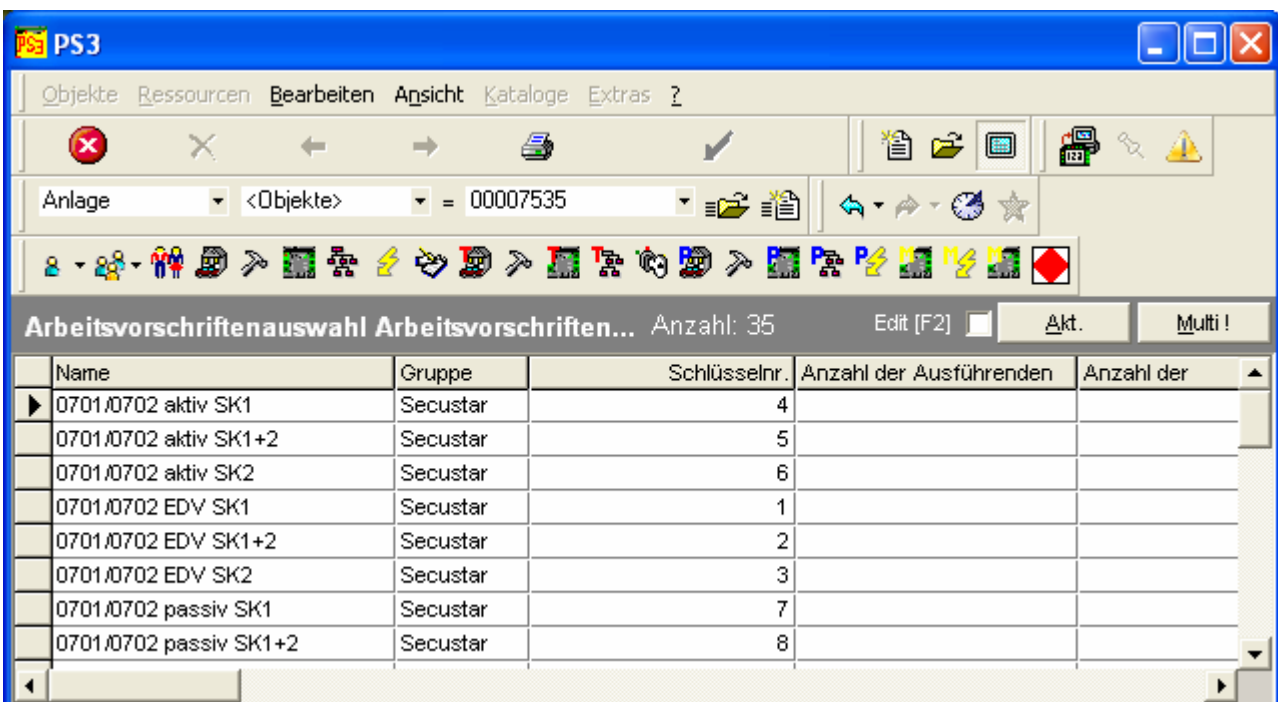

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten



GOSSEN METRAWATT
GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49-(0)-911-8602-0
Telefax +49-(0)-911-8602-669
E-mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com